

Kit Férula al Vacío

Kit de 6 piezas



SPECIAL EQUIPMENT

Especificaciones:

1. Operación fácil, lista para usar: se infla en segundos;
2. Ayuda a prevenir mayores daños a los tejidos blandos.

Las férulas de aire están diseñadas para fracturas, fracturas, aplastamientos, esguinces o extremidades quemadas.

Métodos de uso:

Este paquete incluye seis férulas y una bomba. Elija las férulas de aire adecuadas para diferentes condiciones.

1. Abra las férulas y simplemente envuélvalas alrededor de la extremidad lesionada, luego ciérrela.
2. Abra la tapa de la válvula e infle oralmente o con la micro-bomba, luego cierre.
3. Abra la tapa de la válvula para desinflarla.
4. Abrir y quitar férula.

CÓDIGO DE PRODUCTO YXH-9A Air Splint

Especificación de tamaño:

1. Mano y muñeca 15"
2. Medio brazo 25"
3. Brazo completo 32"
4. Pie y tobillo 15"
5. Media pierna 25"
6. Pierna completa 32"

Especialidad:

1. La aplicación es más rápida, sencilla y cómoda que la convencional tecnologías de vendaje/entablillado.
2. Ayuda a prevenir más daños en los tejidos blandos, combate los golpes y alivia el dolor.
3. Aplica una presión uniforme en el brazo o la pierna lesionados; proporciona un soporte rígido, permite la libre circulación.
4. Inmoviliza, amortigua y protege las extremidades lesionadas para que los pacientes puedan ser transportados con seguridad y facilidad.
5. Completamente lavable y reutilizable: se puede esterilizar con gas para evitar la infección cruzada
6. No es necesario quitar la férula transparente al hacer Rayos X.



Nota:

1. Las férulas infladas con aire pueden tener fugas. Cuando se aplica en clima frío, una férula inflable tiende a expandirse cuando el paciente se traslada a un lugar cálido.
2. También se producen variaciones en la presión si se traslada al paciente a una altura diferente.
3. Supervise con frecuencia la presión de inflado en la férula con la yema del dedo.
4. Evite que la capa superficial sea pinchada con algún objeto ó herramienta afilada.



Seguridad



Servicio



Solución

